

Gebrauchsanweisung - Desinfektionsmittelspender

Bitte beachten Sie vor der Handhabung des Desinfektionsmittelspenders diese Gebrauchshinweise.

Modell „UTE“ und „DESIKUS VARIOS“

Flasche in den Korb stellen, Hebel positionieren - fertig.

Desinfektionsmittel Spender mit offener Architektur.

ULF SYSTEMS Desinfektionsmittelspender sind geeignet für fast alle im Markt befindlichen Desinfektionsmittel, Seifen und Cremeflaschen mit Inhalten 500ml und 1000 ml und der Verwendung von Kunststoff - Dispensern. Dies macht Sie Fabrikat unabhängig.

Entscheidung

Für die Verwendung von 500ml oder 1000ml Flaschen muss vorab entschieden werden, welche Flaschengröße generell im Hause in Gebrauch ist.

Dementsprechend muss bei Bestellung angegeben werden, welche Flaschengröße in der Regel verwendet wird. Da sowohl die Flaschen als auch die Dispenser fabrikatseitig unterschiedliche Größen aufweisen, kann dies mit Ulf Systems Vario Desispender binnen Sekunden ausgeglichen werden.

Anwendung

Wie nachstehende Bilder zeigen, kann der Wechsel eines Korbes bzw. dessen Verstellung binnen Sekunden durchgeführt werden.

Wenn in einem Haus überwiegen 500ml Spender verwendet werden und in Ausnahmefällen auch 1000ml, so empfiehlt es sich, ein paar Körbe der Größe 1000 ml auf Lager zu haben. Die Körbe können binnen Sekunden getauscht werden.

Beachten Sie bei den nachstehenden Bildern die Handhabung des Spenders.

Abb. Links und rechts zeigen Korb mit Adapter und Stellschraube.

Stellschraube unter dem Korb eine halbe bis ganze Umdrehung nach links drehen, Korb in gewünschte Position nach oben oder unten schieben, Stellschraube wieder nach rechts drehen und fixieren.

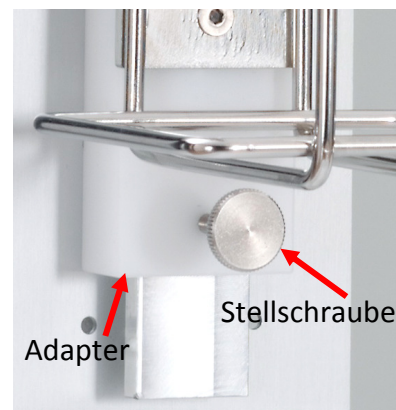




Abb. links und rechts zeigen Korb mit Flasche und Hebel.

Handhabung: Flasche in den Korb stellen, Dispenser auf Flasche schrauben, untere Stellschraube nach links drehen und Korb mit Flasche soweit verschieben, bis der Dispenser sich zwischen dem Verdrehschutz des Hebels befindet. Stellschraube wieder fixieren.

Achtung: Idealer Weise befindet sich der Hebel in einer waagerechten Position befinden, noch besser ist eine leicht an geschräge Position nach oben (siehe Hebel Abb. links und rechts).



Abb. links zeigt Flasche mit richtig positioniertem Hebel.

Mit Ulf Systems Desipenser der Desikus Varios Serie haben Sie keinen Aufwand bezüglich Aufbereitung. Die offene Architektur begünstigt die Verwendung unterschiedlichster Fabrikate als auch Dispenser. Der Zeitaufwand bei Wechsel von verschiedenen Fabrikaten beträgt nur Sekunden. Zudem kann jedes Teil bei Bedarf ersetzt werden.

Ein zukunftsoptimiertes System. Alle Teile bestehen aus Edelstahl und Aluminium. Eine optimale Wischdesinfektion ist gewährleistet



Abb. Links zeigen Korbwechsel, z.B. von 500 ml auf 1000 ml.

Handhabung: Untere Stellschraube nach links drehen und Korb mit Adapter rausziehen. Anderen Korb einsetzen und mit Stellschraube fixieren.

Wechsel dauert nur Sekunden.